


## アキュビュー® だけのアイリッド・スタビライズド・デザイン

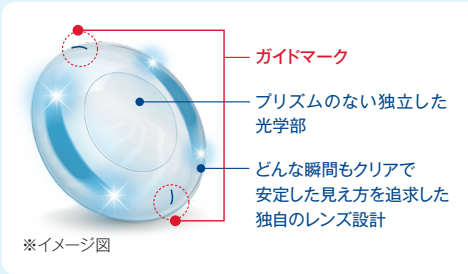

### ワンデー アキュビュー® オアシス® 乱視用 製作範囲

球面度数	円柱度数	円柱軸											
		10°	20°	60°	80°	90°	100°	120°	160°	170°	180°		
+ 0.25D ~ + 4.00D (0.25Dステップ)	- 0.75D					●							●
	- 1.25D					●							●
	- 1.75D					●							●
± 0.00D ~ - 6.00D (0.25Dステップ)	- 0.75D					●							●
	- 1.25D					●							●
	- 1.75D					●							●
- 6.50D ~ - 9.00D (0.50Dステップ)	- 0.75D					●							●
	- 1.25D					●							●
	- 1.75D					●							●

### アキュビュー® オアシス® 乱視用 製作範囲

球面度数	円柱度数	円柱軸											
		10°	20°	60°	80°	90°	120°	160°	170°	180°			
± 0.00D ~ - 6.00D (0.25Dステップ)	- 0.75D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	- 1.25D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	- 1.75D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
- 6.50D ~ - 9.00D (0.50Dステップ)	- 0.75D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	- 1.25D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	- 2.25D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


### ワンデー アキュビュー® モイスト® 乱視用 製作範囲

球面度数	円柱度数	円柱軸											
		10°	20°	60°	80°	90°	100°	120°	160°	170°	180°		
+ 0.25D ~ + 4.00D (0.25Dステップ)	- 0.75D					●							●
	- 1.25D					●							●
	- 1.75D					●							●
± 0.00D ~ - 6.00D (0.25Dステップ)	- 0.75D					●							●
	- 1.25D					●							●
	- 1.75D					●							●
- 6.50D ~ - 9.00D (0.50Dステップ)	- 0.75D					●							●
	- 1.25D					●							●
	- 1.75D					●							●

## クイックスケールの使い方

換算例 〈眼鏡処方箋度数 S-2.25D C-1.25D Ax180°の場合〉

- クイックスケールの縦軸より眼鏡処方箋度数のS **-2.25** **A**を探します。
- A**の隣の**-2.25** **B**がトライアルレンズの球面度数です。
- クイックスケールの横軸より眼鏡処方箋度数のC **-1.25** **C**を探します。
- C**から下に下ろした矢印と**B**から右に伸ばした矢印が交差するマス目の色がトライアルレンズの円柱度数 **D**です。

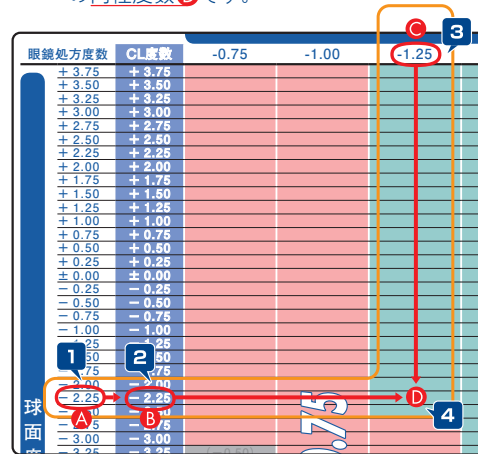

トライアルレンズ度数 S **-2.25D** C **-1.25D** Ax180°

クイックスケールは眼鏡処方箋度数からワンデー アキュビュー® オアシス® 乱視用、アキュビュー® オアシス® 乱視用 およびワンデー アキュビュー® モイスト® 乱視用のトライアルレンズ度数を換算するの目的でご使用ください。

◎コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医による検査・処方をお願いします。特に異常を感じなくても定期検査は必ず受けるようにご指導ください。◎患者さんがコンタクトレンズを使用する前に、必ず添付文書をよく読み、取扱い方法を守り、正しく使用するようにご指導ください。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ビジョンケア カンパニー 東京都千代田区西神田3丁目5番2号

販売名・承認番号:ワンデー アキュビュー オアシス・22800BZX00049000/  
アキュビュー オアシス・21800BZY10252000/ワンデー アキュビュー モイスト・  
21600BZY00408000 ⑧登録商標 ©J&J KK 2015-2020 DRS173

Johnson & Johnson VISION

# クイックスケール

眼鏡度数→コンタクトレンズ度数換算早見表



ワンデー アキュビュー® オアシス® 乱視用



アキュビュー® オアシス® 乱視用



ワンデー アキュビュー® モイスト® 乱視用

ACUVUE®

EYE-INSPIRED.® PATIENT-FOCUSED.

# クイックスケール (眼鏡度数→コンタクトレンズ度数換算早見表)

※この表は角膜頂点間距離12mmで換算したものです。

■ C-0.75

■ C-1.25

■ C-1.75

■ C-2.25

ワンデー アクビュー® オアシス® 乱視用およびワンデー アクビュー®  
モイスト® 乱視用のS-6.50以上ではご用意できない円柱度数です。

■ アクビュー® の乱視用製品ではご用意できない円柱度数です。

## 眼鏡の円柱度数 (D)

眼鏡処方度数	CL度数	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50
+3.75	+3.75												
+3.50	+3.50												
+3.25	+3.25												
+3.00	+3.00												
+2.75	+2.75												
+2.50	+2.50												
+2.25	+2.25												
+2.00	+2.00												
+1.75	+1.75												
+1.50	+1.50												
+1.25	+1.25												
+1.00	+1.00												
+0.75	+0.75												
+0.50	+0.50												
+0.25	+0.25												
±0.00	±0.00												
-0.25	-0.25												
-0.50	-0.50												
-0.75	-0.75												
-1.00	-1.00												
-1.25	-1.25												
-1.50	-1.50												
-1.75	-1.75												
-2.00	-2.00												
-2.25	-2.25												
-2.50	-2.50												
-2.75	-2.75												
-3.00	-3.00												
-3.25	-3.25												
-3.50	-3.50												
-3.75	-3.75												
-4.00	-4.00												
-4.25	-4.25												
-4.50	-4.50												
-4.75	-4.75												
-5.00	-5.00												
-5.25	-5.25												
-5.50	-5.50												
-5.75	-5.75												
-6.00	-6.00												
-6.25	-6.25												
-6.50	-6.50												
-6.75	-6.75												
-7.00	-7.00												
-7.25	-7.25												
-7.50	-7.50												
-7.75	-7.75												
-8.00	-8.00												
-8.25	-8.25												
-8.50	-8.50												
-8.75	-8.75												
-9.00	-9.00												
-9.25	-9.25												
-9.50	-9.50												
-9.75	-9.75												
-10.00	-9.00												
-10.25	-9.00												

球面度数 (D)

C-0.75

C-1.25

C-1.75

C-2.25