



製品の特長

色素のサンドイッチ構造

環状着色部の色素がレンズ素材の中にサンドイッチ状に内包されています。

- 色素が、直接眼瞼や角膜など眼組織に触れません。
- 2ウィークアキュビュー®同様の含水率※1と酸素透過率※2を実現しています。

※1 含水率58%

※2 酸素透過率 (Dk/L値) : 33.3×10^{-9} (cm・mLO₂/sec・mL・mmHg) 測定条件35℃ (-3.00Dの場合)



眼の健康のために

眼の健康を考慮した2週間ごとの新品レンズ

2週間ごとに新しいレンズを装用するため、汚れが蓄積する前に捨てるのでレンズは清潔、快適な装用感。※3
レンズケアは化学消毒剤によるレンズケアを行います。煮沸消毒やタンパク質除去は必要ありません。

2ウィーク アクュビュー® と同じレンズ素材

レンズ素材にはやわらかく装用感※3のよいエタフィルコンAを採用。58%という高い含水率から実現される高い柔軟性だけでなく、酸素透過率（Dk/L値）も33.3※4と、終日装用に必要とされるDk/L値24.1（Holdenら1984）※4を上回っています。また、SSM（スタビライズド・ソフト・モールディング）製法※5により均一なレンズを供給することを可能にしています。

紫外線をカット※6

UV吸収剤をレンズ素材に配合。紫外線B波（波長280～315nm）を約97%、紫外線A波（波長316～380nm）を約81%カットします。※6

※3 装用感には個人差があります。

※4 酸素透過率（Dk/L値）： $\times 10^{-9}$ （ $\text{cm} \cdot \text{mL O}_2 / \text{sec} \cdot \text{mL} \cdot \text{mmHg}$ ）測定条件35℃（-3.00Dの場合）

※5 SSM製法（スタビライズド・ソフト・モールディング製法）：全工程をウェット状態で製造するため膨潤率が極めて低く、均一なレンズを大量に低コストで供給することを可能にしました。

※6 Johnson & Johnson VISION CARE, INC,データより。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係については、臨床試験において確認されておられません。

快適な装用感※7

装用感に優れたレンズデザイン

2ウィーク アクュビュー® 同様、レンズ後面は、「モノカーブ」を採用しております。薄いエッジとの相乗効果により、快適な装用感。※7

※7 装用感には個人差があります。

良好なハンドリング

高い形状安定性を持つレンズデザイン

指にのせたときにレンズのカタチがしっかりできるので、はじめての人でも楽につけられます。

レンズ仕様

	
材質	etafilcon A
含水率	58%
ベースカーブ	8.3mm
直径	14.0mm
パワー範囲	-0.50D~-6.00D(0.25Dステップ) -6.50D~-9.00D(0.50Dステップ) ±0.00D, +0.50D, +1.00D
中心厚 (-3.00Dの場合)	0.084mm
酸素透過値数*	28.0
酸素透過率** (-3.00Dの場合)	33.3
着色剤 (環状着色部)	環状着色部外径 : 12.8mm 環状着色部内径 : 6.2mm 環状着色 : ダークブラウン 環状着色部着色剤 : 金属酸化物系着色剤
レンズマーク	-
紫外線対策***	紫外線A波を約81%カット 紫外線B波を約97%カット
コンタクトレンズ分類	グループIV

- ソフトコンタクトレンズ分類 : グループIV
- 着色剤 (全体着色部) : アントラキノン系着色剤
- 構成モノマー : 2-HEMAおよびMAA
- 紫外線吸収剤 : ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤
- 効能・効果 : 視力補正、虹彩又は瞳孔の外観 (色、模様、形) を変えること

* : $\times 10^{-11}$ (cm²/sec) ・ (mLO₂/mL ・ mmHg) 測定条件35℃

** : $\times 10^{-9}$ (cm ・ mL O₂/sec ・ mL ・ mmHg) 測定条件35℃ (-3.00Dの場合)

*** : Johnson & Johnson VISION CARE, INC.データより。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係については、臨床試験において確認されております。

適応、禁忌

適応

眼科医による検査にて、禁忌となる眼疾患または異常がないことを確認した上で、適性の有無を決定します。

禁忌

2ウィーク アクビュー® ディファイン® は次のような症状や疾患がある場合には装用できません。

禁忌・禁止

- ・ 前眼部の急性および亜急性炎症
- ・ 眼感染症
- ・ ぶどう膜炎
- ・ 眼瞼異常
- ・ 角膜知覚低下
- ・ 角膜上皮欠損
- ・ レンズ装用に問題となる程度のドライアイおよび涙器疾患
- ・ レンズ装用に影響を与える程度のアレルギー疾患
- ・ 常時、乾燥した生活環境にいる患者
- ・ 粉塵、薬品などが眼に入りやすい生活環境にいる患者
- ・ その他のレンズ装用に適さない疾患

<適用対象（患者）禁忌・禁止>

- ・ 医師の指示に従うことができない患者
- ・ 定期検査を受けられない患者
- ・ レンズを適切に使用できない患者
- ・ レンズ装用に必要な衛生管理を行えない患者

※なお、強度の乱視や不正乱視がある場合には、完全な矯正が期待できないこともあります。

※コンタクトレンズの装用により、眼に角膜潰瘍などの重篤な障害を起こす危険性があります。そのために、患者さんへの適切な指導が必要です。